

Cosa c'è di nuovo

Note di rilascio della versione 2.2 per Brailiant BI X e Mantis Q40

Introduzione a una NUOVA modalità "solo terminale"

- È disponibile una nuova modalità che rimuove tutte le applicazioni interne per rendere il display solo un terminale
- Per abilitare o disabilitare la modalità "Solo terminale", avviare la visualizzazione nel menu diagnostico
 - È disponibile un'opzione nel menu diagnostico denominata "Modalità solo terminale"
 - Premere Invio per attivare e disattivare.
- Limitato a 1 connessione USB e 1 connessione Bluetooth
- Plug-and-Play USB
- Per accoppiare il Bluetooth, rimuovere la connessione USB e cercare il dispositivo dal computer host
- Per alternare tra le connessioni USB e Bluetooth, collegare/scollegare il cavo USB
- USB avrà sempre la priorità con Plug and play
- Per accedere e uscire dalle impostazioni del display braille, tenere premuto il pulsante Home per 3 secondi.
- **Nota:** se si passa alla modalità Solo terminale dalla modalità standard, verrà trasferito solo l'ultimo accoppiamento Bluetooth attivo. Tutte le altre connessioni Bluetooth verranno rimosse.
- Nessun TTS disponibile in modalità Solo terminale.
 - Se si ritorna alla modalità standard, sarà necessario scaricare le voci TTS nuovamente.

Auto spegnimento

- È disponibile una nuova impostazione nelle "impostazioni utente" denominata Spegnimento automatico che migliora ulteriormente la durata della batteria.
 - Le opzioni disponibili includono 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore e Mai
 - Quando abilitato, se non è avvenuta alcuna interazione, il dispositivo inizierà a spegnersi
 - Un messaggio indicherà che il dispositivo si sta spegnendo, consentendoti di annullare lo spegnimento.
- Aggiunto un salvataggio automatico in un file temporaneo se il dispositivo si spegne con un documento non salvato aperto

Aggiunta la libreria EOLE (solo BI 20/40X)

- Nuova libreria audio francese aggiunta al servizio online
 - Per accedere correttamente è necessario l'ID utente.

Altre correzioni e miglioramenti

- Gli utenti di Mantis possono ora personalizzare i menù.
 - Le opzioni nascondi/rivela sono ora disponibili nelle "impostazioni"
- Aggiornate le tabelle Braille Liblouis alla versione 3.27
- Aggiornata la versione di Acapela TTS
- L'opzione "richiedi la connessione USB" è ora impostata su "sempre" in modo predefinito
- Risolto un problema per cui i tasti del pollice a volte registravano in modo irregolare una doppia pressione.
- Se si sostituiscono le voci TTS, i profili linguistici che utilizzano la voce precedente verranno sostituiti con la nuova voce
- Risolti i problemi con alcuni file macOS aggiunti oltre a libri o documenti legittimi
- Risolto un problema per cui gli aggiornamenti non erano possibili utilizzando macOS.
 - Questo cambiamento sarà evidente a partire dalla versione 2.2